

2.0mm

1



2



3



4



2.5mm

1



2



3



4



3.0mm

1



2



3



4



- EN** 1 Insert titanium impression post into implant with **finger pressure only**.  
2 Snap plastic impression sleeve onto impression post and take impression.  
3 Remove impression post from implant and connect it to the titanium implant analog.  
4 Insert the post and analog unit into the plastic sleeve in the impression.
- 
- ES** 1 Insertar el poste de impresión de titanio dentro del implante con **presión con los dedos**.  
2 Encaje la cofia plástica de impresión sobre el poste y tomar la impresión.  
3 Después que la cofia plástica fue recogida en la impresión, sacar el poste de impresión de titanio del implante y conectar con el análogo de titanio.  
4 Insertar el análogo y poste conectados dentro de la cofia plástica en la impresión.
- 
- IT** 1 Inserire il posizizzatore di trasferimento nel pozzetto dell'impianto con la sola **pressione delle dita**.  
2 Posizionare la guaina in plastica a scatto, sul posizizzatore e prendere l'impronta.  
3 Rimuovere il posizizzatore dall'impianto ed assemblarlo con l'analogo in titanio.  
4 Inserire posizizzatore e analogo assemblato nell'impronta dove si trova la guaina di plastica.
- 
- PT** 1 Inserir o pilar de moldagem de titânio dentro do implante **apenas com pressão digital**.  
2 Encaixe o munhão plástico de moldagem sobre o pilar e faça a moldagem.  
3 Após a saída do munhão plástico na moldagem, remova o pilar de moldagem de titânio do implante e conecte com o análogo de titânio.  
4 Insira o análogo e pilar conectados dentro do munhão plástico na moldagem.
- 
- DE** 1 Stecken Sie den Abdruckpfosten aus Titan **nur mit Fingerdruck** in den Implantatschacht.  
2 Klicken Sie die Kunststoff Abdruckhülse auf den Abdruckpfosten und nehmen Sie die Abformung.  
3 Entfernen Sie den Abdruckpfosten aus dem Implantat und fügen ihn mit dem Titan Implantat Analog zusammen.  
4 Setzen Sie diese Einheit in die im Abdruck steckengebliebene Abdruckhülse und stellen Sie ihr Labormodell her.
- 
- FR** 1 Insérer le transfert d'empreinte en titane dans l'implant avec **la pression du doigt**.  
2 Cliquer la chape en plastique dans le transfert et prendre l'empreinte.  
3 Retirer le transfert d'empreinte de l'implant et assembler le transfert avec son analogue en titane.  
4 Insérez l'ensemble dans la chape en plastique qui est fixée dans l'empreinte.